

# CP-50 Процесс обновления



Завершить процесс обновления на вашем Устройстве CP-50 для добавления новых вариантов или функциональных возможностей устройства.

## Для обновления программного обеспечения

### CP-50, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Меню, Настройки, Система, Обновления**.
2. Нажмите **Обновление**.
3. Обеспечить серийный номер на материале обновления соответствует серийному номеру, расположенному на базе.
4. Введите **Код Активации**, а затем нажмите следующую стрелу.

11/04/2009  
02:09 PM

SN 109200833409

Key icon: [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F X [X] [Blue Arrow]

5. Все активированные опции будут показаны на дисплее.

11/04/2009  
02:22 ПП

Серийный номер устройства 109200833409

Код активации: 7D63 - 8D34 - E5FA - 663C

Включенные функции: Расшифровка Plus

Обновлен. [Blue Arrow]