




Impresora Z200+ - Referencia rápida

La comunicación USB con la impresora se logra a través de un servicio proxy.

Esta impresora Z200+ está equipada para comunicarse **únicamente a través de una conexión USB** y no está diseñada para usarse con un cable de red. La comunicación USB con la impresora se logra a través de un servicio proxy que viene preinstalado en Q-Stress y XScribe 6.3.0 y versiones posteriores.

Si está operando en un sistema Q-Stress o XScribe 6 con una versión anterior a la 6.3.0, cargue el servicio proxy en el sistema de estrés antes de utilizar la impresora térmica Z200+.


El servicio proxy y las instrucciones de instalación pueden encontrarse en los medios incluidos con esta Z200+.

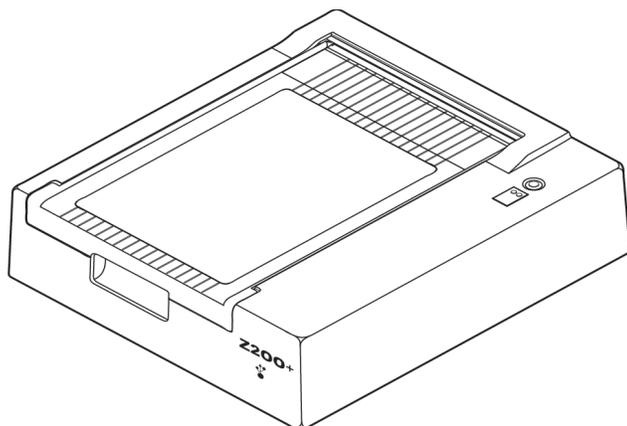

80024866 Ver. B

Fecha de revisión: 10-2019

© 2019 Welch Allyn, Inc.

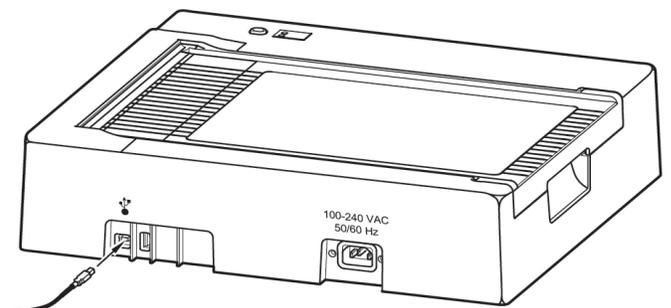

Compatibilidad de la impresora Z200+ (34000-025-1004):

- Sistema Q-Stress o XScribe 6.2.1. o posterior
- Sistema operativo Windows de 64 bits

Nota: Si está instalando esta impresora Z200+ en un sistema Q-Stress o XScribe que previamente usara una impresora Z200+ con un conector de red, debe deshabilitarse la tarjeta de interfaz de red adicional que se instaló en el PC a fin de que pueda funcionar esta impresora.

Para obtener más ayuda, comuníquese con el servicio de Atención al Cliente de Hillrom: mor_tech.support@hillrom.com o 1.888.667.8272.