


La comunicazione USB alla stampante si ottiene mediante un servizio Proxy.

Questa stampante Z200+ è dotata di capacità di comunicazione **solo mediante connessione USB** e non è concepita per essere utilizzata con un cavo di rete. La comunicazione USB alla stampante si ottiene mediante un servizio Proxy che è pre-installato in Q-Stress e XScribe 6.3.0 e versioni successive.

Se si lavora su un sistema Q-Stress o XScribe 6 con una versione precedente a 6.3.0, caricare il servizio Proxy sul sistema Stress prima di utilizzare la stampante termica Z200+.

Il servizio Proxy e le istruzioni per l'installazione sono disponibili sul dispositivo spedito con questa Z200+.

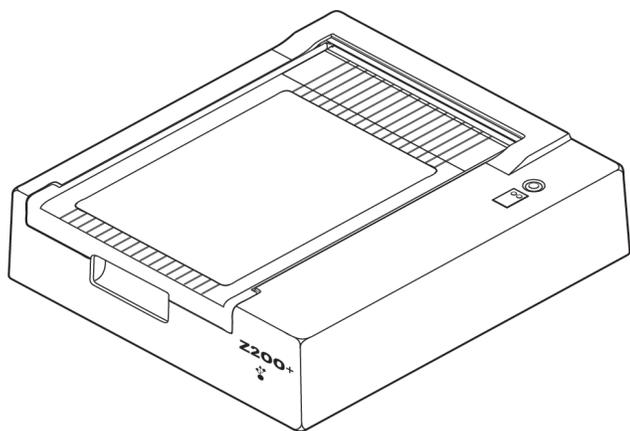

Compatibilità Z200+ stampante (34000-025-1004):

- Sistema Q-Stress o XScribe 6.2.1 o versioni successive
- Sistema operativo Windows 64-bit

Nota: se si installa questa stampante Z200+ su un sistema Q-Stress o XScribe che in precedenza utilizzava una stampante Z200+ con un cavo di rete, la scheda dell'interfaccia di rete aggiuntiva che era installata nel PC deve essere disattivata perché questa stampante funzioni.

Per maggiore assistenza contattare il Servizio clienti Hillrom:
mor_tech.support@hillrom.com o
1.888.667.8272.

