

Stellen Sie vor der Installation des Q-Stress Network Proxy Windows Dienstes sicher, dass die Q-Stress-Software auf dem Computer installiert ist. Die Installationsanleitung finden Sie im Q-Stress-Benutzerhandbuch.

Wenn die Q-Stress-Software installiert ist, installieren Sie den QStressNetworkProxy Windows Dienst von der Z200+ Installations-CD.

Installation

1. Installieren Sie Visual C++ 2013 Runtime durch Ausführen der ausführbaren Datei **vc redistrib_x64.exe**, die Sie von der Z200+ Software-CD herunterladen können.
2. Führen Sie **setupVX_X_X.exe** als Administrator von der Installations-CD aus.
3. Folgen Sie den Installationsanweisungen. Es wird empfohlen, den Computer nach der Installation neu zu starten.

Anmerkung: Der Installationsort ist C:\Program Files\Mortara Instrument\QStressNetworkProxy.

Der QStressNetworkProxy-Dienst wird als automatischer Dienst auf dem Computer installiert.

4. Navigieren Sie nach Abschluss der Installation zu: **C:\Program Files\Mortara Instrument\QStressNetworkProxy**, und führen Sie die Anwendung **QStressNetworkProxy (x64).exe** als Administrator aus. Dadurch wird bei Bedarf erforderliche Software installiert.

Anmerkung: Der Dienst speichert Protokolle unter: C:\ProgramData\Mortara Instrument X-Scribe\Log. Dies ist derselbe Ordner, der für die Q-Stress-Anwendungsprotokolle verwendet wird. Die Dateinamen der Protokolle folgen der Namenskonvention Z200PlusProxy_LogFile_#.txt, wobei "#" dem Tag des aktuellen Monats entspricht.

5. Schließen Sie nach der Installation der Software das Netzkabel an den Netzanschluss des Druckers und an den Trenntransformator an.
6. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-B-Anschluss des Thermodruckers Z200+ und das andere Ende an den USB-A-Anschluss an der Rückseite des Q-Stress-Computers an.
7. Wenn die Installation unter Windows 10 erfolgt, ist die Installation abgeschlossen. Wenn Sie die Installation unter Windows 7 oder 8 durchführen, schließen Sie die Schritte 8-11 ab.
8. Kopieren Sie von der CD den Ordner **Driver for Windows 7** (Treiber für Windows 7) in den Installationsordner C:\Programme\Mortara Instrument\QStressNetworkProxy\.

9. Öffnen Sie den **Device Manager** (Gerätemanager) und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unter *Other devices* (Andere Geräte) aufgelistete HCC-Embedded-Gerät und wählen Sie im Menü **Update Driver** (Treiber aktualisieren) aus.

10. Wählen Sie **Browse my computer for driver software** (Meinen Computer nach Treibersoftware durchsuchen) und navigieren Sie dann zu dem gerade kopierten Ordner C:\Programme\Mortara Instrument\QStressNetworkProxy\Driver auf „Windows 7“ aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

11. Nach der Installation wird ein Fenster geöffnet: *Windows has successfully updated your driver software* (Windows hat Ihre Treibersoftware erfolgreich aktualisiert). Dies kann mit einem neuen Eintrag der Hillrom Z200 Seriennummer unter **Device Manager – Ports** (Gerätemanager – Ports) bestätigt werden.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Hillrom-Kundendienst: mor_tech.support@hillrom.com oder an 1.888.667.8272.