




Hillrom™

Welch Allyn® H12+™ 12-aflednings-Holter

ELEKTRODEPLACERING PÅ 12-AFLEDNINGS HOLTER

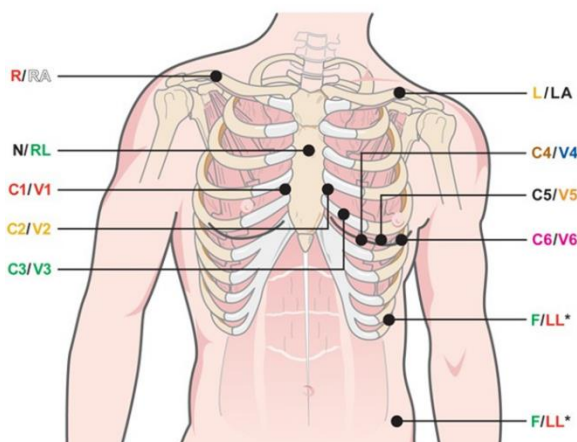

AFLEDNINGSPLACERING

Ekstremitetselektrode		
AAMI	IEC	Placering
RA	R	På eller under højre kraveben som vist
LA	L	På eller under venstre kraveben som vist
RL	N	Reference- eller jordledning skal placeres på et stabilt sted på kroppen
LL	F	Nederste, venstre side af kroppen på et stabilt sted så tæt på hoften som muligt

Prækordial elektrode		
AAMI	IEC	Placering
V1	C1	Fjerde interkostalrum ved højre sternumkant
V2	C2	Fjerde interkostalrum ved venstre sternumkant
V3	C3	Midtvejs mellem V2 og V4
V4	C4	Femte interkostalrum til venstre for den midtclavikulære linje
V5	C5	Forreste axillære linje på samme horisontale niveau som V4
V6	C6	Midtaxillære linje på samme horisontale niveau som V4 og V5



BEMÆRK OG FORSIGTIG: Placering af elektroden på venstre ben (LL = Left Leg) i den oprindelige Mason-Likar-position øger ligheden af det indhentede EKG med et standard-12-aflednings-

EKG og anbefales derfor; beklædning kan dog forstyrre denne placering og øge mængden af støj. Den ændrede position kan reducere følsomheden af underordnede EKG-afledninger og medføre akseksift i forhold til et standard-12-aflednings-EKG. Grundig klargøring af huden og passende beklædning er de vigtigste faktorer til forebyggelse af overdreven støj.




Hillrom™


Welch Allyn® H12+™ 12-aflednings-Holter

Sådan startes en optagelse

1. Fjern batteridækslet og sæt et H12+ SD-kort i kortspalten.
2. Sæt et nyt AA-batteri i og monter batteridækslet igen.
3. Se optagevarighed og samplehastighed (hvis en ændring er nødvendig, henvises til brugermanualen).

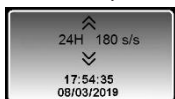

4. Naviger til **LEAD CHECK** (AFLEDNINGSKONTROL) og tryk derefter **ENTER** for at kontrollere elektrodeimpedansniveauer.

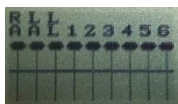

Tryk **ENTER**
for at afslutte.

5. Naviger til **DISPLAY ECG** (VIS EKG) og tryk **ENTER**. Tryk på **UP/RIGHT** (OP/HØJRE) eller **DOWN** (NED) for at se hver enkelt afledning.




Tryk **ENTER**
for at afslutte.

6. Naviger til **ENTER ID** (INDTAST ID) og tryk **ENTER**. Brug tastene til at vælge patient-id.



Når du er
færdig, tryk på
End (Slut) for at

7. Naviger til **RECORD** (OPTAG) og tryk **ENTER** for at starte optagelsen.

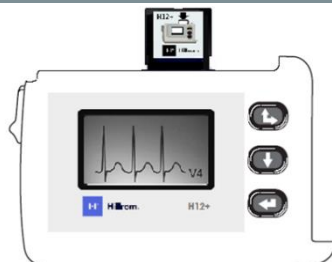

Indstil dato og klokkeslæt

H12+ har et internt backupbatteri til dato og klokkeslæt, med en forventet levetid på tre til fem år.

Følg disse instruktioner for at indstille dato og klokkeslæt:

1. Naviger til **CONFIGURE** (KONFIGURER) og tryk derefter på **ENTER**.
2. Ved **DATE/TIME** (DATO/ KLOKKESLÆT) tryk **ENTER**.
3. Naviger til **SET MINUTE** (INDSTIL MINUT), **SET HOUR** (INDSTIL TIME), **SET DAY** (INDSTIL DAG), **SET MONTH** (INDSTIL MÅNED) eller **SET YEAR** (INDSTIL ÅR) ved at trykke på **NED** og **ENTER**.
4. Tryk på **UP/RIGHT** (OP/HØJRE) for at øge en værdi og **DOWN** (NED) for at mindske en værdi. Tryk **ENTER** for at gemme de(n) opdaterede værdi(er).
5. Naviger til **DONE** (FÆRDIG) ved at trykke på **UP/RIGHT** (OP/HØJRE) eller **DOWN** (NED) og derefter **ENTER**. Gentag for at vende tilbage til **CONFIGURE** (KONFIGURER).

Et ambulant 12-aflednings-EKG taget med ekstremitetsafledninger på torso svarer ikke til et konventionelt diagnostisk EKG.

Welch Allyn® og H12+™ er Welch Allyn's registrerede varemærker.

REF 80025901 Ver. A
Revisionsdato: 2019-08