




Hillrom™

Welch Allyn® H12+™

Aparat Holtera z 12 odprowadzeniami

ROZMIESZCZENIE ELEKTROD W APARACIE HOLTERA Z 12 ODPROWADZENIAMI

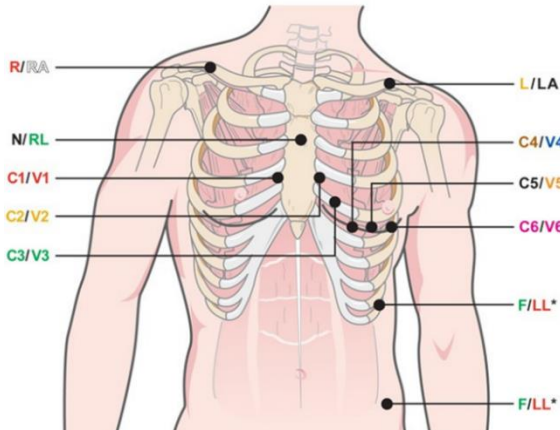

ROZMIESZCZENIE ODPROWADZEŃ

Elektroda zaciskowa na kończynę		
AAMI	IEC	Rozmieszczenie
RA	R	Na prawym obojczyku lub poniżej, tak jak to zostało ukazane
LA	L	Na lewym obojczyku lub poniżej, tak jak to zostało ukazane
RL	N	Odprowadzenie referencyjne lub uziemiające, które powinno zostać umieszczone w stabilnej lokalizacji na ciele
LL	F	Lewa dolna strona ciała w stabilnej lokalizacji, jak najbliższej biodra

Elektroda przedsercowa		
AAMI	IEC	Rozmieszczenie
V1	C1	Czwarta przestrzeń międzyżebrowa na prawo od granicy mostka
V2	C2	Czwarta przestrzeń międzyżebrowa na lewo od granicy mostka
V3	C3	W połowie odległości pomiędzy V2 a V4
V4	C4	Piąta przestrzeń międzyżebrowa na lewo od linii środkowo-obojczykowej
V5	C5	Poziomo, na poziomie V4 w lewej linii pachowej przedniej
V6	C6	Poziomo, na poziomie V4 i V5 w linii pachowej środkowej



UWAGA! OSTROŻNIE! Umieszczenie elektrody lewej nogi (LL) w pierwotnej pozycji Masona-Likara zwiększa podobieństwo zarejestrowanego EKG do standardowego 12-odprowadzeniowego EKG i dlatego jest zalecane; ubranie może kolidować z tą pozycją i zwiększać liczbę artefaktów. Zmodyfikowana pozycja może zmniejszać czułość gorszych odprowadzeń EKG i spowodować przesunięcie osi w stosunku do standardowego 12-odprowadzeniowego EKG. Przygotowanie skóry oraz odpowiednie ubranie stanowią najistotniejsze czynniki zapobiegania powstawaniu nadmiernej liczby artefaktów.




Hillrom™


Welch Allyn® H12+™ Aparat Holtera z 12 odprowadzeniami

Rozpoczęcie sesji rejestracyjnej

1. Należy zdjąć drzwiczki przedziału baterii i do slotu włożyć kartę H12+ SD.
2. Włożyć nową baterię AA i ponownie założyć drzwiczki przedziału baterii.
3. Wyświetlić czas trwania rejestracji oraz częstotliwość próbkowania (w razie potrzeby należy zapoznać się z instrukcją obsługi).

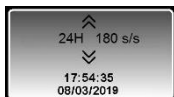

4. Aby sprawdzić poziomy impedancji elektrod należy przejść do pozycji **LEAD CHECK** (Sprawdzenie odprowadzeń), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**.

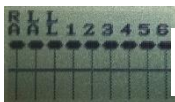

Nacisnąć przycisk

5. Przejść do pozycji **DISPLAY ECG** (Wyświetlaj wykres EKG), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**. Aby wyświetlić każde odprowadzenie należy nacisnąć przycisk **UP/RIGHT** (W górę/ W prawo) lub przycisk **DOWN** (W dół).



Nacisnąć przycisk

6. Przejść do pozycji **ENTER ID** (Wprowadź ident.), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**. Aby wybrać identyfikator



Ustawić datę i godzinę

Karta H12+ jest wyposażona w baterię wewnętrzną podtrzymującą pamięć daty i godziny. Oczekiwany okres przydatności użytkowej baterii wynosi od trzech do pięciu lat.

Aby nastawić datę i godzinę, należy zastosować się do poniższych instrukcji:

1. Przejść do pozycji **CONFIGURE** (Konfiguruj), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**.
2. Znajdując się w pozycji **DATE/TIME** (Data/ Godzina) nacisnąć przycisk **ENTER**.
3. Poprzez naciśnięcie na przycisk **DOWN** (W dół), przejść do pozycji **SET MINUTE** (Nastaw minutę), **SET HOUR** (Nastaw godzinę), **SET DAY** (Nastaw dzień), **SET MONTH** (Nastaw miesiąc) lub **SET YEAR** (Nastaw rok), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**.
4. Aby zwiększyć wartość, należy nacisnąć przycisk **UP/RIGHT** (W górę/ W prawo) lub przycisk **DOWN** (W dół), aby wartość zmniejszyć. Aby zaktualizowaną(-e) wartość(-ci) wprowadzić do pamięci należy nacisnąć przycisk **ENTER**.
5. Poprzez naciśnięcie na przycisk **UP/RIGHT** (W górę/ W prawo) lub przycisk **DOWN** (W dół) należy przejść do pozycji **DONE** (Gotowe), a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**. Aby powrócić do pozycji **CONFIGURE** (Konfiguruj), należy czynność powtórzyć.

pacjenta należy posłużyć się przyciskami.



Po zakończeniu
naciśnąć **End**
(Koniec), aby wyjść.

7. Aby rozpocząć sesję rejestracji
należy przejść do pozycji **RECORD**
(Rejestruj), a następnie naciśnąć przycisk
ENTER.

Wykonane ambulatoryjnie
pomocą elektrod kończynowych umieszczonych na tułowie nie jest równorzędne z konwencjonalnym
diagnostycznym badaniem EKG.

H12+™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Welch Allyn.

12-odprowadzeniowe badanie EKG uzyskane za
pomocą elektrod kończynowych umieszczonych na tułowie nie jest równorzędne z konwencjonalnym
diagnostycznym badaniem EKG.

80025906 Wer. A **REF**

Welch Allyn® oraz

Data nowelizacji: 2019-08