




Hillrom™

Welch Allyn® H12+™ Holter-enhet med 12 ledning

ELEKTROPLACERING FÖR HOLTER-ENHET MED 12 LEDNING

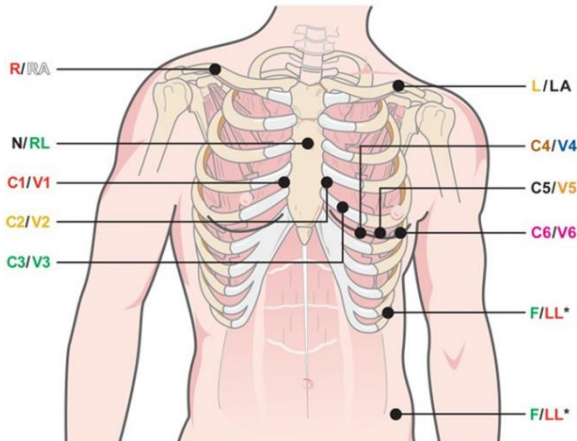

PLACERING AV LEDNING

Extremitetselektrod		
AAMI	IEC	Placering
RA	R	På eller under höger nyckelben (som visat)
LA	L	På eller under vänster nyckelben (som visat)
RL	N	Referens- eller jordledning, ska placeras på en stadig plats på kroppen
LL	F	Den nedre vänstra sidan av kroppen på en stabil plats, så nära höften som möjligt

Prekordial elektrod		
AAMI	IEC	Placering
V1	C1	Fjärde interkostalrummet vid höger bröstbenskant
V2	C2	Fjärde interkostalrummet vid vänster bröstbenskant
V3	C3	Halvvägs mellan V2 och V4
V4	C4	Femte interkostalrummet till vänster om medioklavikularlinjen
V5	C5	Främre axillarlinjen på samma horisontella nivå som V4
V6	C6	Den mellersta axillarlinjen på samma horisontella nivå som V4 och V5



KOMMENTAR OCH AKTSAMHET: Placeringen av vänster bens (LL)* elektrod i den ursprungliga Mason-Likar-positionen ökar likheten med det inhämtade EKG:t med ett 12-lednings standard-EKG och kan därför rekommenderas. Däremot kan kläder störa denna position och öka mängden artefakter. Den ändrade positionen kan minska känsligheten hos sämre EKG-ledningar och orsaka axelväxlingar med avseende på 12-lednings standard-EKG. Noggrann förberedelse av huden och lämpliga kläder är de viktigaste faktorerna i ett omfattande artefaktförebyggande.



Hillrom™


Welch Allyn® H12+™ Holter-enhet med 12 ledning

Påbörja en inspelningssession

1. Ta bort batteriluckan och sätt in H12+ SD-kortet i kortplatsen.
2. Sätt i ett nytt AA-batteri och sätt tillbaka batteriluckan.
3. Visa inspelningens varaktighet och samplingsfrekvens (se användarhandboken om ändring krävs).



4. Gå till **LEAD CHECK** (Ledningskontroll) och tryck sedan på **ENTER** för att kontrollera elektrodernas impedansnivåer.

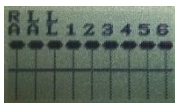

Tryck på
ENTER

5. Gå till **DISPLAY ECG** (Visa EKG) och tryck sedan på **ENTER**. Tryck på **UP/RIGHT** (Upp/Höger) eller **DOWN** (Ned) för att visa varje ledning.




Tryck på
ENTER

6. Gå till **ENTER ID** (Ange ID) och tryck sedan på **ENTER**. Använd tangenterna för att välja patient-ID:t.



När du är klar
väljer du **End**
(Avsluta) för att

7. Gå till **RECORD** (Spela in) och tryck sedan på **ENTER** för att påbörja inspelningssessionen.

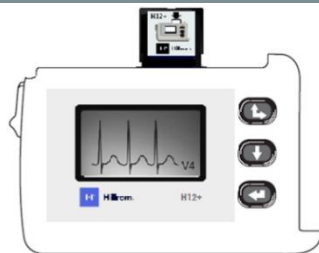

Ställa in datum och tid

H12+ har ett internt backupbatteri för datum och tid, med en förväntad livslängd på tre till fem år.

För att ställa in datum och tid, följ instruktionerna nedan:

1. Gå till **CONFIGURE** (Konfigurera) och tryck sedan på **ENTER**.
2. Vid **DATE/TIME** (Datum/tid), tryck på **ENTER**.
3. Gå till **SET MINUTE** (Ställ in minut), **SET HOUR** (Ställ in timme), **SET DAY** (Ställ in dag), **SET MONTH** (Ställ in månad) eller **SET YEAR** (Ställ in år) genom att trycka på tangenten **DOWN** (Ned) och sedan på **ENTER**.
4. Tryck på tangenten **UP/RIGHT** (Upp/Höger) för att öka ett värde eller på **DOWN** (Ned) för att minska ett värde. Tryck på **ENTER** för att lagra uppdaterade värden.
5. Gå till **DONE** (Klart) genom att trycka på **UP/RIGHT** (Upp/Höger) eller **DOWN** (Ned) och tryck sedan på **ENTER**.

Ett ambulatoriskt 12-lednings-EKG som erhålls med bålplacerade extremitetselektroder motsvarar inte ett konventionellt diagnostiskt EKG.

Welch Allyn® och H12+™ är registrerade varumärken som tillhör Welch Allyn.

REF 80025910 Ver. A
Revisionsdatum: 2019-08